



Массажный стол Proxima Parma Pro 195, арт. BM2L2524
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Детали:

- Столешница
- Подголовник
- Вырез для лица
- Подвес для рук
- Валик

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом сборки и эксплуатации массажного стола. Следуйте всем мерам предосторожности, используйте стол только в соответствии с инструкцией во избежание травмирования и для предотвращения неисправностей стола.

- Рабочая нагрузка на стол не должна превышать 600 фунтов. Рабочая нагрузка стола складывается из веса клиента и давления, оказываемого на стол.
- Рабочая нагрузка на вырез для лица не должна превышать 25 фунтов.
- Удостоверьтесь, что все ножки стола имеют одинаковую высоту, и что стол установлен на плоскую, ровную поверхность.
- Не перегружайте одну сторону стола. Неравномерное распределение веса и/или воздействие чрезмерной нагрузки на одну сторону может привести к наклону, переворачиванию или поломке стола.
- Ни в коем случае не залезайте под стол.
- Не допускайте к столу детей и домашних животных во избежание их травмирования.
- Не храните стол в помещениях с высокой влажностью или температурой воздуха. Воздействие воды или чрезмерная влажность могут повредить материалы и/или электронные компоненты стола.

Уход и обслуживание

Не храните стол в помещениях с высокой влажностью. Воздействие воды или чрезмерная влажность могут повредить материалы.

Хранение:

- Храните стол при комнатной температуре.
- Не устанавливайте стол возле обогревательных приборов, электроприборов, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, не храните в багажнике.

Уход за обивкой:

- Используйте простыни для защиты обивки от попадания масел, лосьонов и кремов.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирачный спирт, агрессивные химические средства для очистки стола. Это может повредить обивку.
- Ежедневно вытирайте пыль и грязь влажной тканью, смоченной в теплом слабом мыльном растворе. Распылите раствор непосредственно на виниловые детали отделки и вытрите сухой тканью без ворса.
- Небольшие пятна можно протирать влажной тканью с мягким неабразивным моющим средством. Распылите средство на влажную ткань и затем аккуратно протрите пятно. Тщательно промойте теплой водой, высушите при помощи ткани без ворса.
- Для дезинфекции используйте средства на основе изопропилового спирта, предназначенные для медицинского использования. Удостоверьтесь, что средство подходит для полиуретана и винила.


Рама:

- Массажный стол сделан из отборной древесины твердых сортов и покрыт лаком. Периодически выполняйте полировку рамы с использованием высококачественных средств для ухода за древесиной. Не используйте агрессивные химические средства – это может привести к повреждению ножек.

Установка

- Для сборки требуется два человека.
- Достаньте содержимое упаковки и удостоверьтесь, что все детали на месте.
- Не используйте острые предметы и ножи при распаковке, чтобы не повредить обивку.
- Проверьте состояние подкладок и обивки до начала сборки. Не выполняйте сборку, если обивка повреждена.
- Не поднимайте столешницу во время сборки. Перемещайте или поворачивайте стол за раму / деревянные ножки.
- Не допускайте детей и домашних животных к столу во время выполнения сборки, так как это может привести к травмированию.
- Не кладите острые предметы возле стола, чтобы не повредить обивку.

Крепеж

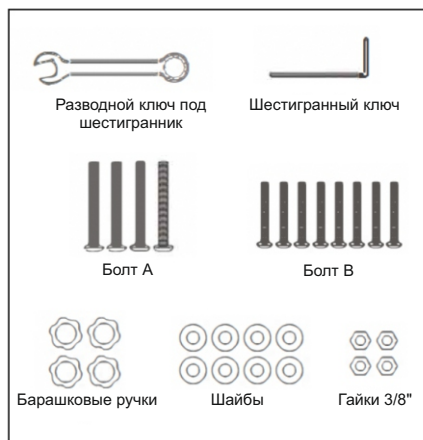

Инструкция по сборке

Этап 1: Положите стол на плоскую ровную поверхность основанием вверх. Рекомендуется подложить мягкое покрывало под стол для защиты обивки.




Этап 2: Разложите ножки, как показано на рисунке ниже. После этого зафиксируйте ножки в каждом углу при помощи Черных болтов-А, используя Разводной ключ под шестигранник и Шестигранный ключ.



Этап 3: Вставьте столешницу в пазы и зафиксируйте ее по углам при помощи Болтов-В, используя шестигранный ключ.



Этап 4: Отрегулируйте высоту ножек. После завершения регулировки, прикрепите ножки к ножкам основной рамы при помощи двух установленных на ножках рамы винтов. После этого затяните Барашковые ручки.

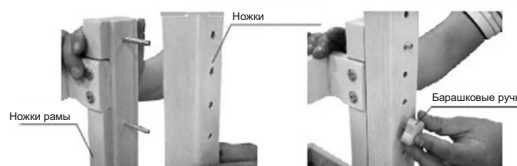


Этап 5: После завершения регулировки ножек, аккуратно переверните стол и установите его в место, где он будет использоваться.



Регулировка столешницы

Чтобы поднять столешницу, переместите ручку под подголовником вправо. После перемещения ручки столешница автоматически поднимется. Придерживайте столешницу второй рукой. После установки в нужное положение, отпустите ручку. Столешница зафиксировается в выбранном положении.

Чтобы опустить столешницу, переместите ручку под подголовником вправо и надавите на столешницу второй рукой. После установки в нужное положение, отпустите ручку. Столешница зафиксировается в выбранном положении. Таким образом можно изменить угол наклона или полностью опустить столешницу.

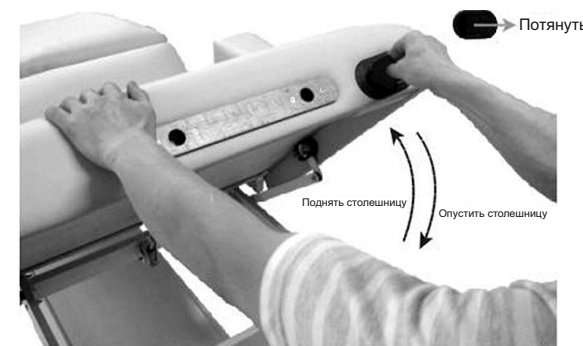

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Заполняется продавцом</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Артикул _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Неисправность _____
Дата продажи _____	_____
Гарантийный срок _____	Проведенные работы _____
Печать и подпись продавца _____ _____	_____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____
_____	Дата ремонта _____

<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Серийный номер _____	Серийный номер _____
Неисправность _____	Неисправность _____
_____	_____
Проведенные работы _____	Проведенные работы _____
_____	_____
Ф.И.О. и подпись мастера	Ф.И.О. и подпись мастера

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте производителя (www.proxima-fitness.ru).
- 2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией.
- 2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- 2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- 2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.)
- 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
 - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)
 - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ;
 - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
 - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____